

## Användning Syfte med manualen.

Manualen beskriver standardmodellen med en lyfthöjd på max. 500 mm. Techlift är designad för permanent installation inomhus och utomhus.

Lyftplattformen kan användas i temperaturområdet –20 till +40 grader. Lyftplattformen kan användas av sittande person för att övervinna nivåskillnader där rullstolsramper blir för långa eller en vanlig hiss är opraktisk eller för kostnadskrävande.

Påkörning och avkörning sker i var ände av lyftplattformen. Techlift är utformad och tillverkad enligt gällande normer för att övervinna nivå- skillnader från 0-500 mm. Lyftintervallet på Techlift kan ställas in mellan 30-500 mm beroende på lokala förhållanden.

När lyftplattformen används förutsätts det, att brukaren har instruerats om handhavandet, eller att det är utbildad personal, som använder detta hjälpmedel/arbetsredskap.

## Viktigt

- Hela bruksanvisningen skall läsas, innan produkten tas i bruk.
- Montage av Techlift skall utföras av Techline godkänd montör.
- Max last 225 kg, får inte överskridas. Max 1 sittande person.
- Lyftplattformen och påkörningsrampen skall vara ren från grus, nedfallna blad, snö m.m. innan användning.
- Lyftplattformen är till för persontransport, och skall användas i överensstämmelse med det beskrivna i denna manual.
- Lyftplattformen får inte användas vid brand.
- Säkerhetsutrustningen får endast nollställas av kvalificerad assistans.
- Lek med och i förbindelse med lyftplattformen, är inte tillåtet.
- Det skall vara beskrivet och avtalat en enkel och brukbar »Nödprocedur« mellan brukare och hjälpare. Det skall säkra, att brukaren inte stängs in på plattan vid elektriskt eller mekaniskt fel.