

## Användning

Betjäning – elektrisk Lyftplattformen körs med hjälp av dom gröna håll don markerat **upp** och **ner**, (död-mans-grepp) som gör att plattformen stannar omedelbart när hålldonet släpps .

Användning av lyftplattformen är enkel och lättbegriplig även utan några förkunskaper om produkten.

### Höja lyftplattformen från den nedersta nivån 0.

När lyftplattformen står i nedersta nivån, och påkörnings rampen är nerfällt kan rullstolsbrukaren ohindrat köra in i/upp på lyftplattformen.

2. Aktivera handbetjäningen genom att trycka på **»upp«** placerad på lyftplattformens torn och hissen lyfter och påkörningsrampen fälls upp; då fungerar den som avkörningsskydd.

3. När lyftplattformen befinner sig i nivå med avsatsen stannar plattformen automatisk, och brukaren kan köra ut på avsatsen.

Om lyftplattformen överbelastas, lyser lampan som är placerad på lyftplattformens torn och ett ljud hörs från summer.

Vid överbelastning kommer plattformen inte höjas eller sänkas. När överbelastningen tas bort, kan lyftplattformen användas igen.

4.Sänka lyftplattformen från översta nivån 1. Rullstolsbrukaren kör ut på lyftplattformen. Aktivera handbetjäningen genom att trycka på **»ner«** placerad på lyftplattformens torn och lyftplattformen kör ned. Knappen **»ner«** är aktiv, så länge det trycks på den.

4. När lyftplattformen når sin nedersta nivå sänks påkörningsrampen, och brukaren kan köra ut från lyftplattformen.

5. Vid någon driftstörning eller fel under färd kan den röda knappen ( **nödstopp**) tryckas in, plattformen kommer inte höjas eller sänkas.

6. Återställning av nödstopp vrid den röda knappen medsols tills den lyfter, hissen är nu åter brukbar.

7. Beskrivning av nödstopp **Nödstopp** får endast användas i nödfall. Om **nödstopp** aktiveras på grund av ett fel, skall servicepersonal kontaktas, för kontroll av lyften innan den tas i bruk igen. Nödstoppet är placerat centralt mellan knapparna **upp** och **ner**. Det stoppar alla funktioner vid aktivering. Urkoppling: nödstoppet vrids ut och genom aktivering av handbetjäningen startar hissen igen.

8.**Tillval** trådlös betjäning Det ger brukaren möjlighet att fjärrstyra lyftplattformen och därmed vara oberoende av en hjälpare.

TECHLINE

Manufacturer TECH LINE Kyrkbacken 2 SE- 507 90 Brämhult

Tel: + 46 (0) 709 837972 Mob: +46 (0) 705 88 96 19

E-Post: [stefan@htu-center.se](mailto:stefan@htu-center.se)

Webb: [www.easytech-sweden.net](http://www.easytech-sweden.net)